

Victory Series Active

Самолигирующие брекететы

Часто задаваемые вопросы



Брекет

1. Какой материал используется для изготовления тела брекета Victory Series Active SL?

Тело брекета Victory Series Active SL изготовлено из нержавеющей стали 17-РН.

2. Брекеты Victory Series Active SL являются пассивными или активными?

Брекеты Victory Series Active SL считаются активными, так как полноразмерные прямоугольные ортодонтические дуги активируют брекететы на финальной стадии лечения. На протяжении всего лечения брекет обеспечивает соответствующий уровень контроля, основанный на размере используемой ортодонтической дуги. С круглыми ортодонтическими дугами, брекет является пассивным, что приводит к минимальному контакту дуги и низкому трению для эффективного выравнивания зубов. С небольшими квадратными или прямоугольными ортодонтическими дугами, брекет является интерактивным, где паз заполнен, но дуга не доходит до дверцы брекета. Это добавляет контроль во время рабочего этапа для закрытия промежутков, исправления ротаций и создания формы зубной дуги. С прямоугольными дугами большего размера сечения является активным, предлагающий полный контроль на этапе детализации.



Дуги, которые обеспечивают интерактивную фазу

.022 паз		.018 паз	
.014 x .025	.020 x .020	.016 x .022	.018 x .018

Примечание: увеличение размеров дуг приведет к увеличению активности брекета.

3. Можно ли использовать эластическую цепочку или связку lace back с брекетами Victory Series Active SL?

Да, брекет имеет достаточное пространство под крыльями, чтобы обеспечить возможность наложения эластичной цепочки и других дополнительных связок, как того требует ваш план лечения.

Дверца

4. Какой материал используется для изготовления дверцы брекета Victory Series Active SL?

Дверцы брекетов Victory Series Active SL изготовлены из термоактивного Никель-Кобальтового сплава.

5. Что делать, если в процессе лечения дверца брекета Victory Series Active SL будет повреждена?

В редком случае повреждения дверцы, дуга может быть зафиксирована металлической или эластической лигатурой. Если же необходимо сохранить эффект самолигирующегося брекета, то брекет следует заменить.

Инструмент

6. Необходим ли специальный инструмент для работы с брекетами Victory Series Active SL?

Для открытия или закрытия дверцы брекетов Victory Series Active SL специальный инструмент не требуется. Можно использовать такие инструменты как: стоматологический зонд или лигатур-директор с заостренным наконечником, чтобы открыть дверцу. Для того, чтобы открыть дверцу, заостренный конец инструмента вводится U-образную выемку Victory Series Active SL.



7. Как правильно открывать дверцу брекета Victory Series Active SL?

Дверца брекета Victory Series Active SL открывается в сторону окклюзионной поверхности или режущего края зуба. Чтобы открыть дверь, поместите инструмент с заостренным наконечником в ее U-образный вырез. Не используйте щипцы Вайнгарда или Хоу для открытия дверцы. Сдвиньте дверцу в сторону окклюзионной поверхности, вдоль плоскости, параллельной основанию брекета (Рис. 1). Избегайте нагрузки на дверцу в направлении, указанном на Рис. 2, для предупреждения поломки дверцы. Не тяните дверцу брекета после ее открытия, в противном случае, дверца может быть деформирована, и брекет потеряет свойство самолигирования (Рис. 3). Чрезмерное открытие может привести к повреждению дверцы.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Victory Series Active

Самолигирующие брекеты

Часто задаваемые вопросы

Инструмент (продолжение)

8. Как закрывать дверцы брекетов Victory Series Active SL?

Дверца может быть легко закрыта с помощью пальца. Не используйте щипцы Вайнгарда или Хоу для закрытия дверцы. Перед закрытием дверцы убедитесь, что дуга полностью помещена в паз брекета.

9. Нужен ли специальный инструмент для удержания брекетов Victory Series Active SL во время фиксации?

Брекет может быть удержан любым стандартным инструментом, например, пинцетом обратного действия.

10. Нужен ли специальный инструмент для снятия брекетов Victory Series Active SL?

Дебондинг брекетов может быть проведен с помощью стандартных инструментов для снятия брекетов. Примечание: Не рекомендуется использование инструмента для снятия самолигирующихся брекетов компании 3M 804-170 для дебондинга брекетов Victory Series Active SL.

Дуги

11. Требуется ли при использовании брекетов Victory Series Active SL особая последовательность смены ортодонтических дуг?

Брекет-система Victory Active SL не требует особой последовательности смены дуг. Врачи могут использовать ту же самую последовательность, используемую с другими активными самолигирующимися системами. Ниже приведен пример протоколов смены ортодонтических дуг, используемый некоторыми врачами при работе с активными самолигирующимися брекетами.

Последовательность дуг	
.022 паз	.018 паз
0.014 или 0.016 Nitinol	0.014 или 0.016 Nitinol
0.020 × 0.020 Nitinol	0.016 × 0.016 Nitinol
0.019 × 0.025 Nitinol	0.016 × 0.025 Nitinol
0.019 × 0.025 Beta III Titanium	0.017 × 0.025 Beta III Titanium

Другое

12. Какую анатомическую площадку имеют брекеты Victory Series Active SL?

Активные самолигирующиеся брекеты Victory Series Active SL имеют микротравленное основание анатомической формы с сеткой с 80тью ячейками. Такое же основание используется у всех брекетов серии Victory, что обеспечивает надежную фиксацию всех брекетов линейки Victory.

13. Совместимы ли брекеты Victory Series Active SL с щечными трубками Victory Series?

Да, система совместима с щечными трубками 3M. Размеры in-out соответствуют у трубок и брекетов. Доктору нужно лишь выбрать подходящий размер паза и пропись для его клинического случая. Примеры щечных трубок для использования с системой брекетов Victory Series Active SL находятся в таблице ниже. Возможно использование и других щечных трубок 3M.



Щечные трубки для первого моляра	.022 паз	.018 паз
верхняя левая	067-9791	067-8791
верхняя правая	067-9782	067-8782
нижняя левая	067-9773	067-8773
нижняя правая	067-9764	067-8764

14. Требуют ли брекеты Victory Series Active SL каких-либо особых требований с точки зрения гигиены полости рта?

Как и для всех ортодонтических пациентов с несъемной аппаратурой, гигиена имеет важное значение для функции и внешнего вида брекетов. Пациентам рекомендуется регулярно чистить зубы щеткой, чтобы предотвратить накопление зубного налета на поверхности и вокруг брекета.



108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный центр Comcity
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Для распространения на мероприятиях для медицинских работников.